

Parfümfreie Tücher zur Flächen-Schnelldesinfektion

VENTISEPT WIPES RTU PUR

- ✓ rückstandsfreie Abtrocknung
- ✓ geeignet für den Lebensmittelbereich
- ✓ umfassende Virenwirksamkeit inklusive Corona- und Noro-Viren (MNV)

Ventisept wipes RTU pur sind gebrauchsfertige, alkoholische Schnelldesinfektions-Tücher zur Desinfektion von alkoholbeständigem medizinischem Inventar und Medizinprodukten sowie Flächen aller Art. Ventisept wipes RTU pur trocknen aufgrund ihrer parfüm- und farbstofffreien Eigenschaften rückstandsfrei ab und sind daher ideal für den Lebensmittelbereich geeignet.

Anwendungsgebiete:

Gem. EU-Medizinprodukte-Verordnung:

Schnelldesinfektion und Reinigung von nichtinvasiven, alkoholbeständigen Medizinprodukten.

Gem. Biozidprodukte-Verordnung (BPR):

Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigem medizinischem Inventar und Flächen aller Art.

Anwendung:

Flächen mit ventisept wipes RTU bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender / Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender / Patient niedergelassen ist, zu melden.

Haltbarkeit nach Anbruch:

28 Tage

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten: 45 g Ethanol.

ACHTUNG:

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung.

Wirkspektren und Einwirkzeiten:

Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion:

Bakterizid, levurozid gem. VAH/EN 16615.....	5 Min.
Tuberkulozid (M.terrae) gem. EN 14348.....	30 Sek.
Mykobakterizid (M. avium und M. terrae) gem. EN 14348.....	1 Min.
wirksam gegen alle behüllten Viren (begrenzt viruzid gem. RKI/DVV).....	30 Sek.
wirksam gegen Noroviren (MNV) gem. EN 14476.....	1 Min.
wirksam gegen Adenoviren gem. EN 14476.....	3 Min.
wirksam gegen Rotaviren gem. EN 14476.....	30 Sek.
begrenzt viruzid PLUS gem. EN 14476.....	3 Min.

ACHTUNG



Verfügbare Gebindegrößen	Blattgröße	REF	Stück / Karton	Stück / Palette
ventisept wipes RTU pur 70 Blatt	25x25 cm	323070P	3 Rollen	288 Rollen
ventisept wipes RTU pur 90 Blatt	30x32 cm	323090P	3 Rollen	150 Rollen

Zulassung und Listungen:

Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste des VAH.

Gelistet in der IHO-Viruzidie-Liste (www.iho-viruzidie-liste.de).

Gemeldet als Biozid-Produkt bei der BAuA unter der Reg.-Nr. N-78269

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

**Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!**

Stand der Information: 2021/02



Medizinprodukt

Hersteller:

Heck Hygiene GmbH · Ostring 1 · 34277 Fuldabrück · GERMANY · Telefon +49 561 220739-00 · www.heck-hygiene.de