

QUICKSEPT AF

ALKOHOLFREIE SCHNELLDDESINFEKTION



Artikelnummer	285698 1 L 285699 5 L
EAN-Nummer	4260096563971 4260096563988
Beschreibung	Kombinationspräparat zur Desinfektion und Reinigung von Flächen und medizinischem Inventar.

Anwendungsgebiete	Alkoholfreie Gebrauchslösung für die Schnelldesinfektion empfindlicher Oberflächen. Enthält keinen Alkohol, keine Aldehyde und kein PHMB. Quicksept AF ist für alle wasserbeständigen Oberflächen geeignet, auch in lebensmittelverarbeitenden Bereichen und in Großküchen anwendbar. Das gebrauchsfertige Quicksept AF eignet sich auch zur vorläufigen Desinfektion und Benetzung kontaminierter chirurgischer Instrumente. Eine solche Vorsterilisationsbehandlung von chirurgischen Instrumenten ist ein wichtiger Schritt, um ein wirksames und sicheres Sterilisationsverfahren sicherzustellen. Es hilft, die mikrobielle Kontamination zu reduzieren und entfernt Blut, Gewebe und andere organische Rückstände von den Instrumenten. Quicksept AF besitzt eine gute Materialverträglichkeit bei Oberflächen und Instrumenten aus Edelstahl, Glas, Aluminium, Kupfer, Messing, Keramik, PVC, Gummi, Kunststoff, Silikon, Acryl und Plexiglas.
--------------------------	--

Anwendung	Quicksept AF kann als Wischdesinfektion oder Sprühapplikation verwendet werden. Die Oberflächen müssen während der erforderlichen Einwirkzeit vollständig benetzt sein. Wischen: Eine ausreichende Menge Lösung auf die Flächen aufbringen oder auf ein geeignetes Einmaltuch geben und die Oberflächen abwischen. Sprühen: Die Lösung auf die Oberfläche mit einem Mindestabstand von 30 cm aufsprühen und mit einem Tuch wischen. Nur bei schwierig zu erreichende Oberflächen anwenden. Die Dauer der Einwirkzeit muss mindestens 60 sek. betragen. Kein Nachwischen erforderlich
------------------	--

Produktdaten	Registriert als Biozid-Produkt bei der BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) gem. Biozidgesetz: BAuA Reg. - Nr.N-100111. UFI-Code: 11S7-R1HK-500W-J04A
---------------------	--

Inhaltsstoffe	100 g Lösung enthalten: Didecyl-Dimethyl-Ammonium Chloride (DDAC) 0,45g ; N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 0,45g
----------------------	--

Wirkungsspektrum	Gebrauchsfertige Lösung, nicht verdünnen. Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion: <table> <tr> <td>Bakterizid (inkl. MRSA, VRE) gem. EN13727, EN14561, EN13697:</td><td>1 Minute</td></tr> <tr> <td>levurozid gem. EN13624, EN 14562, EN 13697:</td><td>1 Minute</td></tr> <tr> <td>alle behüllten Viren gem. EN14476</td><td>30 Sekunden</td></tr> <tr> <td>Rota-, Norovirus gem. EN 14476</td><td>30 Sekunden</td></tr> <tr> <td>Mykobakterizid gem. EN 14348</td><td>5 Minuten</td></tr> <tr> <td>Aspergillus niger gem. EN13624</td><td>10 Minuten</td></tr> <tr> <td>C.difficile gem EN13704</td><td>15 Minuten</td></tr> </table>	Bakterizid (inkl. MRSA, VRE) gem. EN13727, EN14561, EN13697:	1 Minute	levurozid gem. EN13624, EN 14562, EN 13697:	1 Minute	alle behüllten Viren gem. EN14476	30 Sekunden	Rota-, Norovirus gem. EN 14476	30 Sekunden	Mykobakterizid gem. EN 14348	5 Minuten	Aspergillus niger gem. EN13624	10 Minuten	C.difficile gem EN13704	15 Minuten
Bakterizid (inkl. MRSA, VRE) gem. EN13727, EN14561, EN13697:	1 Minute														
levurozid gem. EN13624, EN 14562, EN 13697:	1 Minute														
alle behüllten Viren gem. EN14476	30 Sekunden														
Rota-, Norovirus gem. EN 14476	30 Sekunden														
Mykobakterizid gem. EN 14348	5 Minuten														
Aspergillus niger gem. EN13624	10 Minuten														
C.difficile gem EN13704	15 Minuten														

QUICKSEPT AF

ALKOHOLFREIE SCHNELLDESINFEKTION

**Gegenanzeigen und Nebenwirkungen****Dosierung****Warnhinweise**

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Transport und Lagerung

Das Produkt nicht unter 5 Grad und über 30 Grad lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Alle Behältnisse und Verschlüsse bestehen aus Polyethylen (HDPE).

Die Behältnisse und Verschlüsse sind entsprechend gekennzeichnet, um eine sortenreine Trennung und eine optimale Wiederverwertbarkeit zu ermöglichen. Vollständig restentleerte Verpackungen können dem Recycling (Sammelstelle) zugeführt werden

Hersteller

mobiloclean Handelsgruppe GmbH & Co.KG, Bredentiner Weg 4a, 18273 Güstrow, T +49 89 33 03 7479 10

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.